



BOLETIM TÉCNICO LIPONOX HOSP

1. APRESENTAÇÃO:

É um decapante ácido, recomendado para remover oxidação e manchas de auto-claves e instrumentos em geral. Liponox-hosp tira as crostas de oxidação e manchas, de aço inox, mantendo os instrumentos funcionando por mais tempo. Deve ser usado como manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos.

2. MODO DE USAR:

Usar puro com auxílio de pulverizador, deixar agir no instrumento de 5 A 20 minutos. Enxaguar.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- * Ácido Inorgânico
- * Tensoativo Não-Iônico
- * Água
- * Corante

Componente Ativo: Tensoativo não-iônico

Porcentagem: < 2%

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: Líquido

Coloração: Rosa

pH: 2,0 – 3,0

Densidade: 1,030 g/cm³ (+/-0,05)

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's
- Evite o contato do prolongado do produto puro com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

8. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377

e-mail: tecpon@tecpon.com.br Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 04764-020

09. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
421	3	01/04/16	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Rspnsável