

BOLETIM TÉCNICO LIPOFOS HOSP

1. APRESENTAÇÃO:

É um produto especialmente formulado com detergente para desincrustação e revitalização de peças e instrumentos metálicos. Remove toda ferrugem, manchas, corrosões e placas de depósitos alcalinos de qualquer utensílio em aço inox.

2. MODO DE USAR:

- 1 Diluir uma parte de LIPOFOS HOSP em 10 partes de água (Para cada 1 litro de Lipofos Hosp adicionar 10 litros de água):
- 2 Colocar o material a ser limpo na solução e deixar agir de 5 a 10 minutos:
- 3 Após enxaguar com água fria ou morna.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- * Nonil Fenol Etoxilado 9 mol
- * Solvente
- * Ácido Inorgãnico
- * Sequestrante
- * Veículo

Componente Ativo: Tensoativo Não-iônico

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: Líquido Coloração: Incolor PH sol. A 1%: 2,0 - 3,0

Densidade: 1,10 g/cm3 (+/-0,05)

5. PRECAUCÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual** de Segurança de Produto (FISPQ).

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Notificado na ANVISA/ MS = 25351.228355/2012-54

8.QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 - RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377 e-mail: tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

CÓDIGO	REV.	DATA	PAG.	APROVAÇÃO	LIBERAÇÃO
103	10	08/12/16	1	Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade	Newton Battastini Químico Rsponsável