



BOLETIM TÉCNICO TECSEPT

1. APRESENTAÇÃO:

É um desinfetante de alto nível, à base de Glutaraldeído 2,5%, indicado para a desinfecção de equipamentos, de artigos semicríticos incluindo endoscópios e instrumentais utilizados em odontologia.

Propriedades microbiológicas: Bactericida, Micobactericida, Fungicida e esporocida.

2. MODO DE USAR:

PRODUTO PRONTO PARA USO, sem utilizar ativador, Não diluir. Lavar, enxaguar e secar completamente todo o artigo/instrumental/equipamento a ser imerso na solução de TECSEPT. Imergir completamente no recipiente de desinfecção. Após a imersão, o tempo de contato com o produto é de 15 minutos. Enxaguar. Com auxílio de uma fita teste (modelo Quantofix Glutaraldehyde da Macherey-Nagel que não acompanha o produto), verificar regularmente a concentração de glutaraldeído, que não pode ficar abaixo de 2,5%. A validade da solução em uso é de 28 dias. Eliminar a solução após esta data, ou antes, quando a coloração da fita indicar um valor menor que 2,5%.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Glutaraldeído 2,5% p/p, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Tamponantes, Tensoativo não iônico e Veículo.

4. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:

Estado: líquido

Coloração: incolor

PH concentrado: 5,0 - 6,0

Densidade: 1,00 g/cm³

5. PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

6. PRECAUÇÕES DE USO:

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto, são fornecidas separadamente na **Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ)**.

7. REGULAMENTAÇÕES:

Produto Registrado na ANVISA/ MS = 317800064

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL:

N.M.Battastini - CRQ 05200204 – RS

9. MAIORES INFORMAÇÕES:

Consulte o seu representante TECPON ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-5105377

e-mail: tecpon@tecpon.com.br - Endereço: Rua Nelson Teichmann, 275 CEP: 94930-510

10. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:

2 anos

| CÓDIGO | REV. | DATA | PAG. | APROVAÇÃO | LIBERAÇÃO |
|--------|------|------------|------|--|--|
| 656 | 0 | 27/02/2018 | 1 | Roberta Christo Depto Garantia da Qualidade | Newton Battastini Químico Responsável |